

GEBRAUCHSANWEISUNG

So werden lebensbedrohliche Blutung kontrolliert mit **CELOX™ GAUZE**



1 **Verpackung aufreißen.** Vor der Anwendung die Ausgangsstelle der Blutung identifizieren und direkten Druck darauf ausüben. Anschließend, soweit möglich, überschüssiges Blut entfernen. CELOX Z-Fold Gauze herausnehmen und ein Ende mit der anderen Hand greifen.



2 Die Blutungsquelle direkt mit dem **sich entfaltenden CELOX Z-Fold Gauze austamponieren.** Die verbleibende Wunde mit CELOX Z-Fold Gauze oder einem Standardverbandsmull über Hautniveau austamponieren. Überschüssiges CELOX Z-Fold Gauze kann bei Bedarf abgerissen oder abgeschnitten werden.



3 3 Minuten lang **FESTEN Druck** direkt auf die Wunde **ausüben.** Falls die Blutung anhält, zusätzlich 3 weitere Minuten lang Druck darauf ausüben.




4 Den Verband um die Wunde **binden und verknoten,** um den Druck auf die Wunde aufrechtzuerhalten.



5 **Sämtlichen übrig gebliebenen CELOX Z-Fold Gauze** entsprechend den örtlichen Standardvorschriften für biologische Abfälle **entsorgen.**



6 **Den Patienten** so bald wie möglich in eine medizinische Einrichtung **überführen.**

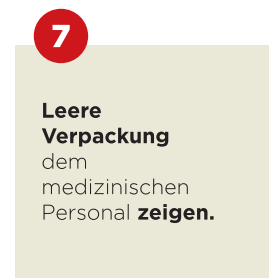

7 **Leere Verpackung** dem medizinischen Personal **zeigen.**