

GEBRAUCHSANWEISUNG

So werden lebensbedrohliche Blutung kontrolliert mit **CELOXTM RAPID**



1



Verpackung aufreißen. Vor der Anwendung die Ausgangsstelle der Blutung identifizieren und direkten Druck darauf ausüben. Anschließend, soweit möglich, überschüssiges Blut entfernen. CELOX Rapid aus der Verpackung nehmen und ein Ende des z-gefalteten Verbandsmulls in die Hand nehmen.

2



Den entfaltenden CELOX Rapid direkt auf die Blutungsquelle geben und die **Wunde dicht austamponieren**. Verbleibende Wunde mit CELOX Rapid oder einem Standardverbandsmull über dem Hautniveau austamponieren.

3



Wenn die Blutung anhält, 1 Minute lang oder bis die Blutung gestillt ist, festen Druck direkt auf die Wunde ausüben..

4



Überschüssiges CELOX Rapid-Material kann wie benötigt abgerissen oder abgeschnitten werden. Den Verband um die Wunde binden und verknoten, um den Druck auf die Wunde aufrechtzuerhalten.

5

Sämtliches übriges CELOX Rapid-Material entsprechend den örtlichen Standardvorschriften für biologische Abfälle entsorgen.

6

Den Patienten so bald wie möglich in eine medizinische Einrichtung **überführen**.

7

Leere Verpackung dem medizinischen Personal **zeigen**.