

ChitoSAM™ 100

SAM
MEDICAL

HÄMOSTATISCHER VERBAND AUS 100 % CHITOSAN

NUR ZUR TEMPORÄREN ÄUSSEREN ANWENDUNG

Zur Kontrolle von mäßig starken bis starken Blutungen und für das Management von äußeren Abschürfungen, Lazerationen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Die korrekte Verbandgröße und -anzahl für den betreffenden Wundbereich und die Blutungsmenge verwenden.
2. Das Verbandmaterial unmittelbar auf die Wunde aufbringen.
3. Zum Kontrollieren der Blutung 3 Minuten lang festen Druck ausüben. Mit einem geeigneten Deckverband fixieren; dabei weiterhin Druck auf die Wunde ausüben.

VORSICHT/WARNHINWEIS:

Nicht über den Augen anbringen.
Enthält Chitosan von Schalentieren.

Beim Entfernen verbliebene Verbandrückstände mit steriler Kochsalzlösung oder Wasser von der Wunde abspülen.

WARNHINWEIS:

Bei einer Allergie gegen Schalentiere einen Arzt zu Rate ziehen.

Der Verband muss innerhalb von 24 Stunden entfernt werden.

- Nicht mit Naturlatex hergestellt
- Nicht resterilisieren
- Nicht wiederverwenden
- Bei beschädigter oder offener Verpackung nicht verwenden

SYMBOLGLOSSAR

Hersteller	
Chargenbezeichnung	
Bestellnummer	
Nicht wiederverwenden	
Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden	
Nicht resterilisieren	
Nicht mit Naturlatex hergestellt	
Temperaturbereich	
Sterilisation durch Bestrahlung	
Verwendbar bis	
Vor Feuchtigkeit schützen	
Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft	
Medizinprodukt	
Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren	
CE-Kennzeichnung	
Importeur	

REF	CT101-A-EN / 10 cm x 10 cm (4 Zoll x 4 Zoll) Einlagiger hämostatischer Verband
REF	CT101-B-EN / 7,6 cm x 1,22 m (3 Zoll x 4 ft) Hämostatischer Z-Falz-Verband
REF	CT101-C-EN / 7,6 cm x 1,83 m (3 Zoll x 6 ft) Hämostatischer Z-Falz-Verband

HERGESTELLT IN TAIWAN

Hergestellt von:
BenQ Materials Corporation
29, Jianguo E. Road, Gueishan Taoyuan, Taiwan, R.O.C.
+886.3.374.8800
benqmaterials.com

CE 2460



Obelis S.A, Bd. Général Wahls, 53,
1030 Brüssel, Belgien

Vertrieb:
SAM Medical Products®
12200 SW Tualatin Rd, Ste 200
Tualatin, OR 97062 USA
+1 503.639.5474

sammedical.com

CT-US-DE-1
AUSSTELLUNGSDATUM: 2021-06