

Produktdatenblatt

Weroplast® BlueMamba Schnellpflaster



REF 201029 (einzeln), 201031 (12 Stk/Pkg)

- Anwendungsbereich:**
- Die schnelle Wundversorgung für alle Arbeitsbereiche, bei kleineren Schürf- und Schnittwunden.
 - Einsetzbar als Wundschnellverband, Fingerpflaster, Fingerkuppenpflaster, Fingergelenkpflaster.
 - Leichter bis mittlerer Verschmutzungsgrad.
- Produkteigenschaften:**
- Haftet dank seiner besonderen Struktur nur an sich selbst (kohäsiv) – aber nicht an Haut, Haaren oder Wunde
 - Klebstofffreies Pflaster
 - Blutabsorbierend
 - Elastisches, rutschfestes Material
 - Farbe: blau – zur visuellen Erkennbarkeit, geeignet für den Lebensmittelbereich
 - Schmerzlos zu entfernen
 - Hautfreundlich
 - Wasser- und ölabweisend
 - Latex- und klebstofffrei
- Anwendung:**
1. Verpackung öffnen und Pflasterrolle entnehmen. Je nach Stärke der Blutung den Anfang des selbsthaftenden Pflasters mehrfach falten um ein Wundkissen zu bilden.
 2. Das gefaltete Wundkissen auf die Wunde legen und 1 – 2 x umwickeln.
 3. Pflaster abreißen oder abschneiden und loses Ende andrücken.
 4. Fingerkuppenverletzung: Am Gelenk einmal umwickeln und spiralförmig zur Fingerkuppe weiterführen. Mehrmals um die Kuppe wickeln. Bei stärkerer Blutung ein Wundkissen bilden. Spiralförmig wieder zum Ausgangspunkt wickeln. Pflaster abreißen oder abschneiden und loses Ende andrücken.
- Maße:** 5,5 m x 3 cm
- Material:** Vliesstoff, Elasthan, synthetischer Kautschuk
- Farbe:** Blau
- Lagerung:** Trocken aufbewahren. Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.
- Klassifizierung:** Medizinprodukt Klasse I

Hersteller: Kingstar Medical (Xianning) Co., LTD, No. 79 Yong'andong Road, Xian'an District, 437100 Xianning City, Hubei Province, People's Republic of China

EU-REP: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

CH-REP: QS Experts AG, Rütihof 1, 8820 Wädenswil, Switzerland

Importeur: WERO GmbH & Co KG, Idsteiner Straße 94, 65232 Taunusstein, Germany, info@wero.de, www.wero.de

Stand: November 2025, V05, FÜ