

Produktdatenblatt

WERO Beatmungsmaske



REF 220429

Anwendungsbereich: Taschenmaske schützt vor Infektionen bei der Mund-zu-Nase- oder Mund-zu-Mund-Beatmung

Produkteigenschaften:

- Verhindert direkten Kontakt mit dem Betroffenen
- Sehr gute Abdichtung durch flexiblen Maskenwulst
- Transparenter Maskendom zur Beobachtung der Lippen und Erkennen von Erbrochenem
- Für den einmaligen Gebrauch
- Inklusive Einwegventil und Kopfverband
- Mit Anschluss für Sauerstoff-Zufuhr

Anwendung: Die Beatmungsmaske wurde primär entwickelt für die Mund-zu-Maske-Beatmung bei Atemstillstand (bei Erwachsenen, Kindern und Kleinkindern). Sie sollte nur von Personen angewandt werden, die eine entsprechende Ausbildung in Anwendung von Beatmungshilfen absolviert haben.

An die Beatmungsmaske können andere Beatmungsgeräte, z. B. Beatmungsbeutel oder sauerstoffbetriebene Beatmungsgeräte direkt angeschlossen werden.

Anwendung an Erwachsenen und Kindern:

1. Filter auf richtigen Sitz überprüfen und Maskendom nach außen drücken.
2. Maske mit dem Kinnansatz zwischen Unterlippe und Kinn des Patienten aufsetzen und damit gleichzeitig die Unterlippe zurückschieben, um den Mund offen zu halten. Das schmale Ende der Maske über die Nase des Patienten ziehen.
3. Maske abdichten. Atemwege öffnen. Langsam in die Maske blasen bis sich der Brustkorb hebt.

Anmerkung: Erbricht der Patient, Maske abnehmen und Atemwege freimachen. Maske durch Schütteln oder Auswaschen reinigen. Ventil durchblasen, um Funktion sicherzustellen. Maske wieder aufsetzen und mit der Beatmung fortfahren.

Die Beatmungsmaske kann auch ohne Ventil verwendet werden.

Anwendung an Kleinkindern:

Die Anwendung erfolgt hierbei wie beschrieben mit der Ausnahme, dass die Maske umgedreht (schmales Ende der Maske unter dem Kinn des Kleinkindes) auf das Gesicht gesetzt wird.

Anwendung mit Sauerstoff:

Maske mit Kopfhaltband befestigen. Die Durchführung der HLW (Herz-Lungen-Wiederbelebung) wird damit erleichtert, eine spontane Sauerstoffeinatmung ist möglich.

Extra Sauerstoff – Sauerstoffzuführung an den Sauerstoff-anschluss der Maske anschließen. Sauerstoff einstellen. Beatmen, wenn erforderlich.

Achtung: Dieses Produkt ist nur zum Einmalgebrauch bestimmt. Eine Wiederverwendung führt zu Keimvermehrung und Keimverschleppung. Sterilisation und Reinigung (zur Wiederverwendung) kann die Funktion und Wirkungs-weise des Produktes beeinträchtigen und Patienten-gefährdung hervorrufen.

Temperaturbereiche:	Anwendung: -18°C bis 40°C Lagerung: -30°C bis 50°C
Expirations- und Inspirationswiderstand:	<3 cm H ₂ O: 50 lpm
Totraum:	<80 ml Die Leistungen sind Nennwerte
Maskenanschluss:	Ø 26 mm
Sauerstoffanschluss:	Ø 6 mm
Lagerung:	Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.
Verwendbarkeitsdauer:	5 Jahre ab Produktionsdatum. Bitte beachten Sie das auf dem Produkt aufgebrachte Verfallsdatum.
Klassifizierung:	Medizinprodukt Klasse IIa
Hersteller:	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH, Emil-Hoffmann-Str. 53, D-50996 Köln
Vertrieb durch:	WERO GmbH & Co KG, Idsteiner Straße 94, 65232 Taunusstein, Germany, info@wero.de , www.wero.de

Stand: Dezember 2025, V02, FÜ